


医療施設用

環境・器具・物品用除菌洗浄剤

ザルクリーン

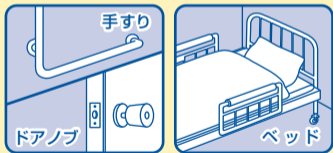

500mL

火気注意

環境表面の細菌・ウイルス除去に



スプレー：PP,PE
ボトル：PE
ラベル：PE
外装フィルム：PE

- 〔品名〕 医療施設用除菌洗浄剤
〔成分〕 界面活性剤（ベンザルコニウム塩化物）、溶剤（エタノール）、安定化剤
〔液性〕 弱アルカリ性
〔用途〕 医療施設等の環境表面・器具・物品（床や壁、ドアノブ、ベッド柵等）の除菌・洗浄

- 〔使用方法〕 ①先端ノズルを回して「ON」を△印に合わせてください。
②対象物に直接スプレーするか、もしくは布等にスプレーして清拭した後、拭き取ってください。
③使用後は先端ノズルを回して「OFF」を△印に合わせてください。



- 〔使用量の目安〕
20平方センチメートル当り 1回スプレー（0.7mL）

⚠ 使用上の注意（使用前に必ずお読みください）

- 用途以外には使用しないでください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。

- 皮ふに付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。
- 本剤は希釈せず、原液のまま使用してください。
- 人体には使用しないでください。
- あやまって飲み込んだ場合には、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をし、医師に相談してください。
- 使用時にはゴム手袋、マスク等を着用し、換気のよい場所で使用してください。
- 広範囲又は長時間使用しないでください。
- 対象物が血液や汚物等で汚れている場合は、清掃してから使用してください。
- 一部の合成樹脂等、材質によっては変質（変色）するおそれがあるので、注意してください。
- 衣類等につくと脱色、変色するおそれがあるので注意してください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 火気に近づけないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

製造番号は容器底面に記載

健栄製薬株式会社
大阪府大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626