

医療施設用

環境・器具・物品用除菌洗浄剤

ザルクリーン



環境表面の 細菌・ウイルス除去に

スプレーで除菌・洗浄

1. 除菌成分として、第四級アンモニウム塩（ベンザルコニウム塩化物0.1 w/v%）及びエタノールを含有し、液性を弱アルカリ性とすることで、環境表面の細菌・ウイルスに対して相乗的に作用します。
2. 便利なスプレー式なので、対象物に直接スプレーして使用することができます。
3. 金属やプラスチックへの腐食性は少ないです。



500 mL

非危険物

手が頻繁に触れるドアノブ、 手すり、ベッド柵等への使用例

対象物に直接スプレー



布等にスプレー




乾いた布で拭く



ドアノブ

対象物を清拭する

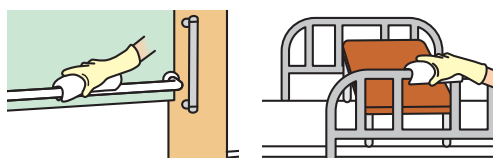

手すり

ベッド柵

●一部の合成樹脂等、材質によっては変質（変色）するおそれがあるので、注意してください。

ザルクリーンのINFORMATION

商品名	和名	ザルクリーン
	洋名	ZALCLEAN
製造販売元	健栄製薬株式会社	
品名	医療施設用除菌洗浄剤	
販売開始年月	2012年11月	
成分	界面活性剤（ベンザルコニウム塩化物）、溶剤（エタノール）、安定化剤	
液性	弱アルカリ性	
用途	医療施設等の環境表面・器具・物品（床や壁、ドアノブ、ベッド柵等）の除菌・洗浄	
使用方法	①先端ノズルを回して「ON」を△印に合わせてください。 ②対象物に直接スプレーするか、もしくは布等にスプレーして清拭した後、拭き取ってください。 ③使用後は先端ノズルを回して「OFF」を△印に合わせてください。	
使用量の目安	20平方センチメートル当り1回スプレー（0.7mL）	
使用上の注意 (使用前に必ずお読みください)	●用途以外には使用しないでください。 ●目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。 ●皮ふに付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。 ●本剤は希釈せず、原液のまま使用してください。 ●人体には使用しないでください。 ●あやまって飲み込んだ場合には、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をし、医師に相談してください。 ●使用時にはゴム手袋、マスク等を着用し、換気のよい場所で使用してください。 ●広範囲又は長時間使用しないでください。 ●対象物が血液や汚物等で汚れている場合は、清掃してから使用してください。 ●一部の合成樹脂等、材質によっては変質（変色）するおそれがあるので、注意してください。 ●衣類等につくと脱色、変色するおそれがあるので注意してください。 ●直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 ●他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。） ●火気に近づけないでください。 ●小児の手の届かない所に保管してください。	
包装	500 mL	

[詳細は製品容器等をご参照ください。]

資料請求・お問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号 電話番号 06(6231)5626 FAX番号 06(6204)0750

