

医療施設用

環境・器具・物品用除菌洗浄剤

泡状

ジアエン[®]フォーム



泡で除菌・洗浄

細菌・ウイルスなどの除去、
血液・吐物汚れに

1. 次亜塩素酸ナトリウムを0.1～0.5%含有した泡状の除菌洗浄剤です。
2. 除菌成分（次亜塩素酸ナトリウム）及び界面活性剤等を含有することで、環境表面の細菌芽胞等に対して相乗的に作用します。
3. 泡状で吐出されるため、液の飛散が少ないです。
4. 希釈不要なので、そのまま対象物に使用することができます。




450 mL

トイレの手すり、便座、吐物で汚染された床等への使用例



●一部の合成樹脂や金属等、使用対象物によっては、印刷面、材質等を変質（変色）するおそれがあるので、注意してください。

ジアエン[®]フォームのINFORMATION

商品名	和名	ジアエン [®] フォーム
	洋名	JIAEN FOAM
製造販売元		健栄製薬株式会社
品名		医療施設用除菌洗浄剤
販売開始年月		2012年12月
成分		次亜塩素酸ナトリウム（0.1～0.5%）、界面活性剤（ラウロイルサルコシナトリウム）、水酸化ナトリウム（1%）、安定化剤
液性		アルカリ性
用途		医療施設等の環境表面・器具・物品（トイレの手すりや便座、床等）の除菌・洗浄
使用方法		<p>①先端ノズルを回して「ON」を△印に合わせてください。</p> <p>②対象物に直接スプレーするか、もしくは布等にスプレーして清拭した後、必ずしっかり拭き取るか流水で洗い流してください。（拭き残しがあると対象物に変質（変色）するおそれがあります。）</p> <p>③使用後は先端ノズルを回して「OFF」を△印に合わせてください。</p>
使用量の目安		20平方センチメートル当り1回スプレー（0.7mL）
使用上の注意 (使用前に必ずお読みください)		<p>〔使用期限〕 容器肩部下段に記載</p> <hr/> <p>〔注意〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div> <p>●用途以外には使用しないでください。</p> <p>●体調のすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患のある方は使用しないでください。</p> <p>●使用時には保護メガネ、ゴム手袋等を着用し、換気のよい場所で使用してください。</p> <p>●アルコール製剤や酸性の洗浄・漂白剤、シアン酸系の製品等と混合すると塩素ガスが発生して危険ですので避けてください。</p> <p>●人体には使用しないでください。</p> <p>●目に入らないように注意してください。</p> <p>●使用時に発生する蒸気は呼吸器等を刺激するので、吸入しないように注意してください。</p> <p>●本剤は希釈せず、原液のまま使用してください。</p> <p>●広範囲又は長時間使用しないでください。</p> <p>●肩より高い位置で使用しないでください。</p> <p>●一部の合成樹脂や金属等、使用対象物によっては、印刷面、材質等を変質（変色）するおそれがあるので、注意してください。</p> <p>●衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意してください。</p> <p>●直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。</p> <p>●他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）</p> <p>●使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。</p> <p>●小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>〔応急処置〕</p> <p>●目に入った時は目を傷めるおそれがあります。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。</p> <p>●皮膚に付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。</p> <p>●あやまって飲み込んだ場合には、吐かずにすぐに水・生卵・ミルク等を飲み、医師に相談してください。</p> <p>●使用中、目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがい等をしてください。</p>
	包装	

〔詳細は製品容器等をご参照ください。〕

資料請求・お問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号 電話番号 06(6231)5626 FAX番号 06(6204)0750

