

# 救急用絆創膏 (Sheer Plasters)

指定医薬部外品

# ケエバンA

〈半透明〉

k-banA

ケエバンAは肌に良くマッチする、スマートな半透明の救急絆創膏で、ワンタッチで傷の保護ができる、べんりな家庭常備品です。

## 【使用上の注意】



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください  
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

## 【効 能 効 果】 【用 法】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護（被覆）  
被覆してある両側のセパレーターをはぎとり、パッドに触れないようにして、パッドが傷口を保護するように貼り付けてください。

### 〈用法及び用量に関連する注意〉

- 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。
- 粘着面を患部に貼らないでください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなるので、貼り替えてください。
- 本剤は、パッド部分にアクリノール水和物を使用しているが、アクリノール水和物の消毒効果を弱めるので、ヨードチンキと同時に使用しないでください。
- 用法を守ってください。

## 【成 分 分 量】


パッド中 日本薬局方アクリノール水和物0.4%

## 【保管及び取扱 い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

## 【サ イ ズ】

19mm×72mm

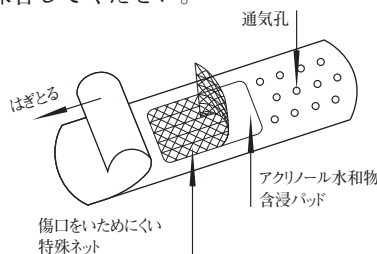

## 【包 装】 1サイズ100枚入