
コンタクト用 食塩水

高温処理済

Saline Solution

【用 途】
【使用上の注意】

本品は0.9%の塩化ナトリウム溶液です。
ソフトコンタクトレンズのすすぎ液としてご利用ください。



- 1) 液を取り出したあとは直ちに密栓し、開口状態で放置しないでください。
- 2) 一度取り出した液を元の容器に戻さないでください。
- 3) レンズのすすぎに使った液は、再度使用しないでください。
- 4) 開封後はなるべく速やかに使用してください。
- 5) もし目に刺激を感じたり、異常を感じたときは使用を中止し眼科医に相談してください。
- 6) 容器の先が、人指等に触れると、雑菌等のため、液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。又、におい、混濁、沈澱が生じたものは使用しないでください。
- 7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【保管上の注意】

- 1) 直射日光をさけてください。
- 2) なるべく冷所（冷蔵庫等）に密栓して保管してください。
- 3) 他の容器に入れかえないでください。

【包 装】

500mL